

MASQUE BARRIÈRE LAVABLE RÉUTILISABLE

Ref. 000696



Masque barrière lavable et réutilisable 5 fois au sens de la norme Afnor Spec S76-001:2020 - Classe 2, testé jusqu'à 50 lavages.
Ce masque est destiné à diminuer le facteur de risque de transmission des agents infectieux (Virus, Grippe, COVID-19, etc.).
L'efficacité de filtration de ce masque est supérieure à 70%. Comme tout masque barrière, la durée du port est limitée à 4 heures.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

COMPOSITION

Textile Evolon® EVO 80 PK - Etoffes en micro filaments 70%
Polyéthylène Téréphtalate et 30 % Polyamide - Spunbond hydro liées
Attaches : Polyester-Latex

DIMENSION

Le masque barrière est dimensionné de façon à correspondre à la morphologie moyenne de la population française.

CONDITIONNEMENT

Carton de 5 masques

Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (Masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (Masques filtrants de type FFP2).

LES + DU PRODUIT

- Produit « **Made in France** », fabrication 100% française
- Alternative **écologique** aux masques jetables

UTILISATION

METTRE EN PLACE LE MASQUE

1. Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique
2. Repérer le haut du masque et placer le masque barrière sur le visage
3. Tenir le masque, passer les élastiques derrière les oreilles, baisser pour couvrir le menton
5. Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains.
Chaque fois que le masque barrière est touché, le porteur doit se laver les mains.

RETIRER LE MASQUE

1. Retirer le masque en saisissant par l'arrière les élastiques, sans toucher la partie avant
2. Placer le masque dans un contenant propre pour le stocker jusqu'au prochain lavage
3. Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique

ENTRETIEN

Lavable minimum 5 fois en cycle complet de lavage (Mouillage, lavage, rinçage) de 30 minutes à 60 °C. Testé jusqu'à 50 lavages.

3 méthodes de lavage

- **Lavage traditionnel** : cycle complet de 30 minutes minimum à 60°C
NOTE : il n'est pas conseillé d'utiliser d'adoucissant
- **Lavage à la bouilloire** : désinfection à la bouilloire
- **Lavage au stérilisateur** : désinfection à l'aide d'un stérilisateur